

**PODOSTRIPE**<sup>®</sup>  
KLEBESPANGE

**podo**fix<sup>®</sup>

COMBI  
**ped**

**3TO**  
SPANGE



## BEISPIELE AUS DER PRAXIS

**PODOSTRIPE**<sup>®</sup> DIE ELASTISCHE KLEBESPANGE

**PODOFIX**<sup>®</sup> DIE AKTIV-KLEBESPANGE

**COMBIPED**<sup>®</sup> DIE INTELLIGENTE DRAHT-KLEBE-SPANGE

**3TO-SPANGE**<sup>®</sup> DIE 3-TEILIGE DRAHTSPANGE



Auf den folgenden Seiten sehen Sie Behandlungsbeispiele mit den Nagelkorrekturspannen von 3TO. Da jeder Nagel und jedes Nagelwachstum individuell sind, variieren Behandlungsdauer und Behandlungsergebnis von Fall zu Fall.



SPANGEN-TYP	KLEBSPANGE		KOMBINATION	DRAHTSPANGE
	PODOSTRIPE®	Podofix®	COMBIped®	3TO®
Einseitig / Beidseitig	beidseitig	beidseitig	eine Seite stärker	beidseitig
Intensität	+	++	+++	+++
Einfache Anwendung	+++++	+++	++	++
Risikopatienten (z.B. Diabetiker)	++++	++++	○	○
Nagelfalz nicht zugänglich/ Hypergranulation	geeignet	geeignet	bedingt	bedingt

## Für jeden Fall die optimale Spange

**Welche Spange ist die richtige für welchen Fall? Je nach Diagnose wird vom Therapeuten eine entsprechende Nagelkorrekturspange gewählt.**

Die podofix® und PODOSTRIPE® Klebspangen aus Kunststoff eignen sich besonders für dünnere Nägel und leichtere Fälle eingewachsener Nägel.

Die 3TO-Drahtspangen und die kombinierte Draht-Klebspange COMBIped® werden beidseitig oder einseitig unter den Nagelrand eingehängt und wirken daher etwas stärker. Bei Entzündungen ist die Abgrenzung mit einer Vlies-Tamponade, regelmäßige Kontrollen und evtl. die Zusammenarbeit mit einem Arzt von besonderer Bedeutung.

Vom eingewachsenen Nagel bis zum starken Rollnagel können nahezu alle Fälle mit diesen Spangen wieder in Form gebracht werden. Für die 3TO-Spange® ist allerdings eine spezielle Schulung notwendig, wohingegen die anderen Spangentypen auch ohne Kurs angewendet werden können.

Welche Spange für den Patienten die perfekte Therapiemethode darstellt, entscheidet der Fußprofi nach der individuellen Diagnose. Häufig werden im Verlauf der Behandlung auch unterschiedliche Spangen eingesetzt - perfekt abgestimmt auf die aktuellen Bedürfnisse des einzelnen Nagels und Patienten.



## Die elastische Klebespange



### KANTIGE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Frau Negel-Riegel



### PROBLEMNÄGEL

Behandlungszeitraum 4 Monate · Fotos: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



## Die Aktiv-Klebespange



### EINGEWACHSENE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Dr. Scholz



### KLEINE NÄGEL

Behandlungszeitraum 6 Monate · Fotos: Frau Göhringer-Seel



Foto: Dr. Scholz



Foto: Frau Lauer



Foto: Dr. Scholz



Foto: Frau Göhringer-Seel



## Die intelligente Draht-Klebespange



### EINGEWACHSENE NÄGEL

Behandlungszeitraum 2 Monate - Fotos: Frau Maurer



### ROLLNÄGEL

Behandlungszeitraum 2 Monate - Fotos: Frau Maurer



KLEINE NÄGEL

Foto: Frau Negel-Riegel



BEI KINDERN

Foto: Frau Kouba



EXTREMFÄLLE


Foto: Frau Negel-Riegel



ZWEITE ZEHE

Foto: Frau Kouba

## Die 3-teilige Drahtspange

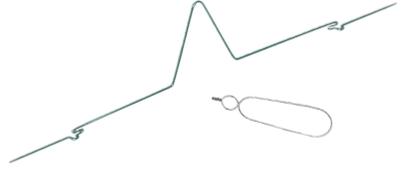

### ROLLNÄGEL

Behandlungszeitraum 18 Monate · Fotos: VAN SAN-SHO, INC., Tokyo; Dr. Shuzo Kawai



### KANTIGE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Dr. Scholz



Foto: Dr. Scholz



Foto: Dr. Scholz



Foto: Frau Maurer



Foto: Dr. Scholz

DICKE NÄGEL

ROLLNÄGEL

EXTREMFÄLLE

BEI KINDERN



**PODOSTRIPE**<sup>®</sup>  
KLEBSPANGE

**podofix**<sup>®</sup>

COMBA  
**ped**

**3TO**  
SPANGE

**3TO** IHR SPEZIALIST FÜR  
NAGELSPANGEN

Tel.: 089 4520833-0  
Fax: 089 4520833-99  
info@3to-gmbh.de

3TO GmbH  
Tölzer Straße 65  
82041 Deisenhofen

**f** [www.facebook.com/3TO.GMBH](http://www.facebook.com/3TO.GMBH)

Weitere Infos und  
kompetente Beratung  
erhalten Sie von  
unseren Experten  
unter 089 4520833-0.

**WWW.3TO.DE**

© 2023 // 3TO GmbH  
Diese Informationen sind aus-  
schließlich für Fachpersonal  
und nicht zur Weitergabe an  
Patienten bestimmt.